

Merianto Medical haiglamööbli kasutus- ja hooldusjuhend

Mida jälgida mööbli kasutamisel?

Merianto Medical haiglamööbel on projekteeritud sihtotstarbeliseks kasutamiseks normaalsetes sisetingimustes. Mööblit tuleb säilitada ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei ole madalam kui +10°C ning suhteline õhuniiskus on vahemikus 40-60%.

Soovitav on mööblit kaitsta otseste päikesekiirte eest, mis võib muutada toodete värvust ja välimus: viimistletud pinnad pleekuvad ja tuhmuvad, lakitud pinnad võivad praguneda. Enim ja kiiremini mõjutab päikesekiirgus naturaalsest puidust ja spoonitud pindasid.

Toodete riuleid, ukse, sahtleid, tööpindu ei tohi tohi üle koormata raskete esemetega. Samuti ei tohi uste külge kinnitada täiendavaid detaile või lisakoormuseid, mida ei ole arvesse võetud toote projekteerimisel. Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete ukсед ja laekad hoida suletuna.

Kuumade esemete mööblile asetamine võib rikkuda toote pinna, soovitav kasutada sobilikke kuumaaluseid.


Teravate servadega või metallist esemed võivad mööbli pinda vigastada.


Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga.

Kui mööbli konstruktsioonis on nähtavaid tõmmitsaid, polte või kruvisid, tuleb neid aegajalt kontrollida. Sõltuvalt tootest ja kasutuskoormusest kontroll teostada 2-4 aastase intervalliga. Vajadusel pöörduda Merianto klienditeeninduse poole.

Spetsiifilist mööblit ümber paigutades on soovitav kasutada spetsialistide abi või vajadusel tootjalt nõu küsida. Seinte külge kinnitatavate kappide puhul tuleb jälgida kindlasti tootja paigaldusjuhiseid. Paigaldustöid tehes ei tohi unustada ohutusnõudeid.

Mööblit kolides tuleb toodetelt eemaldada liikuvad osad – sahtlid, ukсед, siseriulid, lisatarvikud – ning kõik eraldi hoolikalt pakkida, et vältida detailide võimalikku vigastamist.

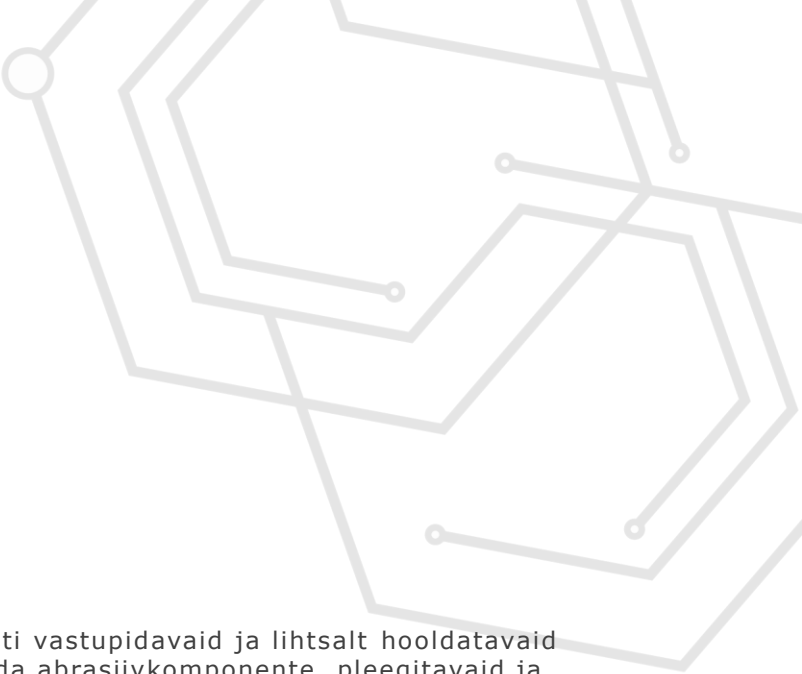

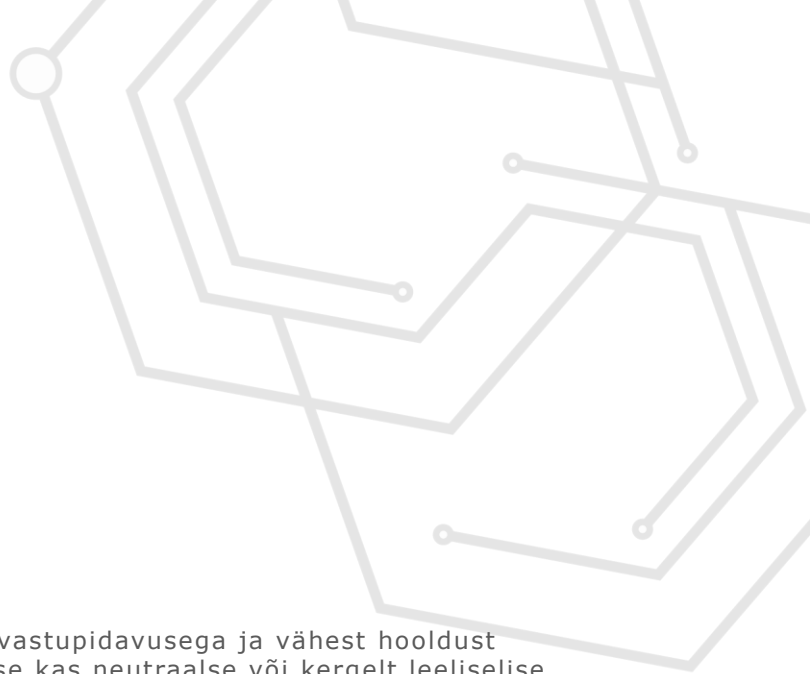

Et hoida ära õnnetusjuhtumeid ja vältida toodete vigastusi, tuleb kõiki tooteid kasutada eesmärgipäraselt! Tooted on tihti väga rasked ja nende tõstmisel peab sellega arvestama.

Merianto OÜ toodetele kehtib kahe aastane (2 a.) garantii. Garantii tähtaeg hakkab kulgema toote Ostjale üleandmise päevale järgnevast päevast. Garantii kehtib tingimusel, et mööblit on kasutatud sihtotstarbeliselt ja regulaarselt hooldatud.

Garantii ei laiene toote loomulikule kulumisele, täispuidust, naturaalspooniga, kanga või nahaga kaetud mööbliesemete tekstuuri ja värvitooni erinevustele. Garantii ei laiene klaasidele, peeglitele, kivi- ja komposiitpindadele.

Garantii katkeb, kui:

- mööblit ei ole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud;
- garantiiaja jooksul on mööblit ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on mööblit lõhutud või on reguleeringud paigast läinud;
- mööblit on garantiiaja jooksul ise remonditud või ostja/kasutaja poolt valesti hooldatud;
- mööblile on lisatud algselt mitteettenähtud detaile;
- kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel.

Täname usalduse eest, et olete valinud Merianto oma koostööpartneriks. Loodame, et meie pakutud tooted ja teenused vastavad teie vajadustele ja ootustele. Oleme tänulikud igasuguse tagasiside eest, see aitab meil Teile tulevikus üha paremat kvaliteeti pakkuda. Toodete, nende kasutamise ja hooldusega seotud küsimuste osas võib meiega alati ühendust võtta kontaktidel info@merianto.com või + 372 6 542 000.